

# Kurzanleitung Antigen-Selbsttest


Produkt: CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test  
Hersteller: Siemens Healthineers



## Vorbereitung

1

Verschlussfolie vom Röhrchen entfernen und Röhrchen in eine Halterung stellen (z. B. Klammer)

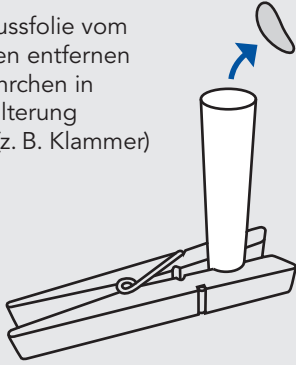


## Probennahme (bei Zimmertemperatur)

2

Abstrichtupfer nacheinander in beide Nasenlöcher ca. 2-4 cm einführen, jeweils fünfmal gegen die Naseninnenseite drehen

Den Tupfer nicht tiefer einführen, wenn Widerstand spürbar ist

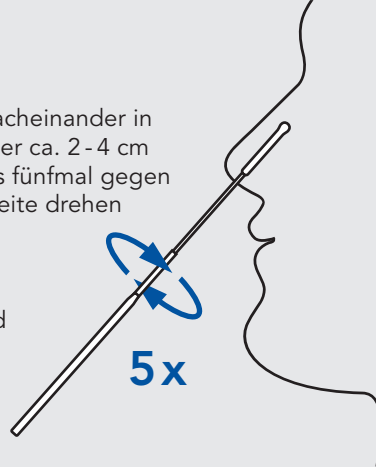


## Probenbehandlung

3

mind. 6x

Abstrichtupfer in das Röhrchen einführen, mindestens sechsmal drehen und dabei gegen die Röhrchenwand drücken

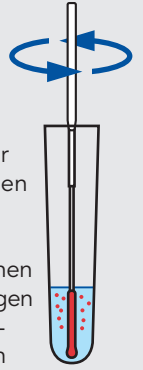

## Probenbehandlung


4



Abstrichtupfer eine Minute im Röhrchen stehenlassen

5

Röhrchen mehrmals gegen Tupfer zusammendrücken

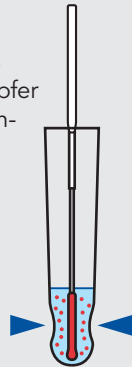

6


Abstrichtupfer entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken, um Flüssigkeit vom Tupfer abzustreifen

Anschließend Tropfkappe fest aufsetzen



7

Vier Tropfen in Probenvertiefung auf der Testkassette geben

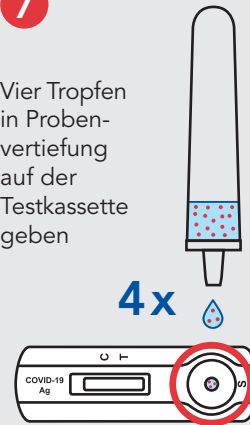

8




Ergebnis ablesen **nach 15 min**

Sind mehr als 20 Minuten vergangen, ist der Test ungültig und muss wiederholt werden

## Auswertung Testergebnis

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten

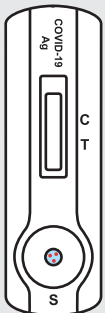


**Negativ**

Farbige Kontrolllinie (C)



keine Infektion nachweisbar

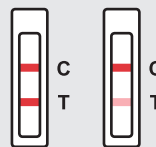


**Positiv**

Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)



Verdacht auf Infektion: PCR-Test erforderlich

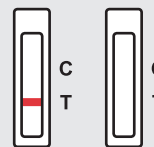

**Ungültig / unklar**

Keine Kontrolllinie (C)



Test wiederholen

## Entsorgung



Verwendete Testkits in einem verschlossenen Beutel im Hausmüll entsorgen